

- ✓ **Non-toxique**
- ✓ **Nettoie & désinfecte**
- ✓ **Protection des équipements**

BioTEXT™

WIPES

3 MINUTES
TEMPS DE CONTACT

UNE SEULE ÉTAPE

LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES CLINIQUES

BioTEXT™ est la seule lingette désinfectante prête à l'emploi à large spectre, de qualité clinique et alimentaire, spécialement formulée pour une utilisation sur les surfaces délicates ou irrégulières. Elle a prouvé son efficacité contre les principaux micro-organismes sur des surfaces en naugahyde, cuir, vinyle, plastique et caoutchouc. Idéal pour les tuyaux, tissus, tapis, chaises ainsi que pour les surfaces fréquemment touchées comme les claviers et les écrans tactiles. BioTEXT™ dégage un parfum frais et agréable.



DIN 02442329

VIRUCIDE • BACTÉRICIDE • FONGICIDE • TUBERCULOCIDE

PLUS RAPIDE



Désinfection en une étape

Nettoie et désinfecte en une seule étape, permet de gagner du temps et évite le gaspillage de produit.



Temps de contact de 3 minutes

Action rapide et produit à large spectre contre les agents pathogènes principaux.



Désinfectant à large spectre

Efficace contre la TB, VHB, VHC, VIH, STAPH, COVID-19, SARM, les champignons et plus encore.

PLUS SÉCURITAIRE



Protège et ravive

Sans danger pour le cuire, le vinyle, le naugahyde et les plastiques. N'entraîne pas de fissures et ne décolore pas les surfaces.



Formule sans traces

Nettoie et désinfecte sans laisser de traces ni endommager les surfaces de verres ou de plastiques.



Sécuritaire pour les usagers

Ne contient pas de quats, de phénols, de peroxydes ni d'aldéhydes. Désinfectant non toxique à base d'ingrédients végétaux. Aucun ÉPI nécessaire.

PLUS DOUX



Respectueux de l'environnement

Tous les produits sont fabriqués à partir d'ingrédients biodégradables et d'origine végétale.



Certifié biodégradable

Tous les ingrédients sont de qualité pharmaceutique USP et/ou de qualité alimentaire.



Emballage recyclable


Les contenants sont entièrement recyclables.



UNE SEULE ÉTAPE


LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES CLINIQUES

LE SURFOL

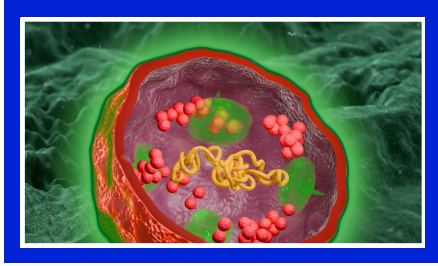

SurfOL, le surfactant de Micrylium, élimine l'air entre le désinfectant et la surface à nettoyer. Cela permet un contact immédiat entre le désinfectant et l'agent pathogène, **ce qui entraîne un temps d'élimination plus rapide.**

THÉORIE DE LA CHAISE

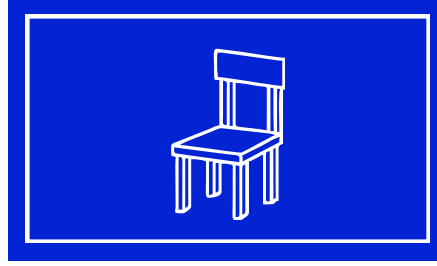

La stratégie chez Micrylium repose sur la théorie de la chaise. Les 4 pattes de la chaise assurant l'équilibre, représentent les 4 grandes catégories d'agents pathogènes. Les temps d'action affichés par les produits concurrents reflètent généralement les temps les plus rapides. Par exemple, un concurrent peut obtenir un temps d'action de 1 min. pour la TB et de 15 min. pour le poliovirus, mais affichera seulement le plus rapide, soit 1 min. Chez Micrylium, **nous indiquons un temps d'action qui reflète un équilibre entre les 4 catégories, pour une efficacité réellement représentative.**

PROTECTEUR



Les lingettes BioTEXT™ contiennent du SurfOL breveté de Micrylium, qui forme un revêtement protecteur spécialement conçu pour les surfaces délicates. Cette technologie **protège les surfaces souples** tout en les ravivant et en leur redonnant un apparence neuve.

MODE D'EMPLOI



1 Soulevez le couvercle du distributeur en tenant la charnière et tirez vers le haut. Retirez le sceau en aluminium et tirez une lingette par le centre.



2 Faites passer la lingette à travers l'ouverture du couvercle et remettez le couvercle en place en laissant 2 cm de lingette dépasser. Gardez le capuchon fermé lorsque non utilisé.



3 Essayez soigneusement toutes les surfaces avec une lingette BioTEXT™ et laissez agir 3 minutes à température pièce. Consultez la FDS avant utilisation pour plus de détails.



4 Le nettoyage et la désinfection avec BioTEXT™ s'effectuent en une seule étape. Les surfaces fortement souillées doivent être essuyées avant la désinfection.



5 Installation alimentaire : Évitez toute contamination des aliments pendant l'application. Rincez ensuite à l'eau potable après la désinfection.



6 Pour usage professionnel uniquement. Ne pas utiliser comme lingette pour la peau ni pour bébé.

Spécification des produits

Numéro item	Description produit	Format
01-TXWC-160	BioTEXT™ Lingette RTU (160 lingettes)	Caisse de 12
01-TEXT-060	BioTEXT™ 60mL petit vaporisateur RTU	Caisse de 10
01-TEXT-704	BioTEXT™ 710mL grand vaporisateur RTU	Caisse de 4
01-TEXT-005	BioTEXT™ 5L Bag-in-Box RTU	1 Boîte

Avis des clients

« BioTEXT™ a complètement transformé l'expérience de nos cliniques. Offrir un désinfectant sécuritaire pour toutes les surfaces y compris les surfaces sensibles nous permet d'assurer un niveau de contrôle des infections exceptionnel, sans craindre les dommages à long terme causés par des produits chimiques agressifs. En plus, il place la sécurité du personnel au premier plan. »

Rachel Hicks, CEO, Fern Whitening

BTWCAFR4.31.10.25



Manufactured By
Micrylium Laboratories Inc
5000M Dufferin Street, Toronto, Canada
M3H 5T5
+1 416-667-7040
www.micrylium.com



UNE SEULE ÉTAPE

LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES CLINIQUES

ÉTUDES



Les désinfectants Micrylium sont testés en laboratoire pour mesurer leur temps de contact en présence de sang frais. La plupart des désinfectants concurrents sont testés avec du sang animal, car les protéines du sang humain neutralisent leur efficacité. Le test de référence le plus exigeant est celui de la TB, que BioTEXT™ élimine efficacement en moins de 180 sec. Les bactéries formant des biofilms Gram négatif (*Pseudomonas* sp.) sont également neutralisées en 180 sec.

SURFACES IRRÉGULIÈRES



BioTEXT™ est spécialement conçu pour désinfecter le vinyle, naugahyde, verre et plastique qui sont des surfaces souvent irrégulières. Les désinfectants à base de quats, de phénols ou de peroxyde d'hydrogène peuvent assécher ou fissurer ces matériaux. De plus, ces surfaces sont souvent recouvertes de revêtements hydrofuges, les désinfectants dilués à l'eau ont alors tendance à former des gouttelettes et deviennent inefficaces. Avec BioTEXT™, les agents pathogènes sont éliminés efficacement tout en protégeant les surfaces délicates.

LINGETTE



La lingette BioTEXT™ est fabriquée à partir d'une fibre biodégradable non blanchie conçue pour fonctionner en parfaite synergie avec la solution BioTEXT™. Douce et absorbante, elle permet une application uniforme sur les surfaces. Son grand format de 6" x 6,5" facilite le nettoyage et offre une meilleure couverture.

TEMPS DE CONTACT

Type	Agents pathogènes	Temps de contact
Bactérie	Salmonella choleraesuis (ATCC 10708)	180 secondes
Bactérie	Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)	180 secondes
Bactérie	Staphylococcus aureus (ATCC 6538)	180 secondes
Bactérie	Escherichia coli (CTC 10541)	180 secondes
Mycobactérium	Mycobacterium bovis (BCG)	180 secondes
Mycobactérium	Mycobacterium terrae (ATCC 15755)	180 secondes
Mycobactérium	Mycobacterium tuberculosis var; bovis (BCG) (*activité tuberculocide activity)	180 secondes
Mycobactérium	Mycobacterium smegmatis (*activité tuberculocide)(PN 1034)	10 minutes
Fongus	Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533)	180 secondes
Fongus	Trichophyton menhingi (ATCC 12106)	180 secondes
Fongus	Candida albicans candida auris	180 secondes
Virus	Canine Parvovirus (CPV-265)	300 secondes
Virus	Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)	30 secondes
Virus	Coronavirus 19 (SARS-CoV-19)	30 secondes

Note : Le lot de formulation initiale (âgé de 60 jours) a été testé sur 60 réplicats, conformément à la méthode AOAC 955.15, afin d'assurer un niveau de confiance de 95 %. Chaque lot de production est ensuite testé sur 10 réplicats (0 % d'échec) pour garantir le respect continu des spécifications de contrôle de qualité propres à chaque produit.

* Les tests ont été réalisés au laboratoire Nucro-Technics, situé au 2000, chemin Ellesmere, unité 16, Scarborough (Ontario).
Tous les autres essais ont été effectués aux laboratoires Micrylium, au 117, promenade Dolomite, North York (Ontario).




Health Canada BioTEXT COVID-19 Certification www.canada.ca/en/health-canada.html

BTWCAFR4.31.10.25

Communiquez avec votre distributeur autorisé pour passer une commande.



Manufacturé par
Micrylium Laboratories Inc
5000M Dufferin Street, Toronto, Canada
M3H 5T5
+1 416-667-7040
www.micrylium.com

1. IDENTIFICATION									
Nom du produit		BioTEXT™ Lingettes			Adresse du fabricant		Micrylium Laboratories Inc.		
Inscription	CAN DIN	Liquide	02442329		Indication	Téléphone	5000M Dufferin Street, Toronto, Canada, M3H 5T5 www.micrylium.com		
		Lingette	02209640						
	CH BAG		CHZB0163						
	DE BAUA		N-24686						
# téléphone urgence		CHEMTREC			Fax		416-667-0071		1-800-424-9300
2. IDENTIFICATION DES DANGERS									
Symbole et pictogramme					Signalisation		Attention		
Classification		Sensibilisation cutanée Cat. 1			Symbole		WHMIS		
Risque pour la santé		Voir ci-dessous			Environmental Hazards		Biodégradable		
Déclarations de danger et de précaution		Mentions de danger H302 : Nocif en cas d'ingestion. H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.			Déclaration de précaution P102 : Tenir hors de portée des enfants. P301 : EN CAS D'INGESTION : boire de grandes quantités d'eau ou de lait. P305 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment à l'eau.				
3. COMPOSITION									
Produit chimique		CAS #		LD-50 (Oral, mg/kg)		Concentration (%)			
Ethanol		64-17-5		7060 (Rat)		19.9%			
Gluconate de chlorhexidine		18472-51-0		2000 (Rat)		0.1%			
4. PREMIERS SECOURS									
Inhalation		Si la respiration est difficile, déplacer la personne à l'air frais.			Ingestion		Pas d'effet secondaire. Légèrement asséchant.		
Contact avec la peau		Légèrement asséchant. En cas d'irritation, laver avec de l'eau et du savon			Contact avec yeux		Rincer abondamment à l'eau.		
Symptômes et effets les plus importants (aigus et retardés)									
Peut provoquer une somnolence aiguë légère, une irritation respiratoire et/ou oculaire.									
Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire									
Non applicable.									
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE									
Non-inflammable.									
6. DÉVERSEMENT ACCIDENTEL									
Utiliser tous les moyens pour éviter tout déversement. Aucune autre mesure spécifique n'est nécessaire, à condition d'éviter toute accumulation de vapeurs.									
7. MANIPULATION ET STOCKAGE									
Conserver dans un endroit frais, sec et ventilé. Tenir éloigné de chaleur, de flamme ou d'étincelle. NE PAS mélanger avec de l'eau de Javel ou peroxydes. Stockage et transport : 0°C - 30°C.									
8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE									
Aucune mesure spécifique requise. EPI recommandé mais non obligatoire.									
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES									
État physique	Couleur	Odeur	Point de solidification	Point d'ébullition OECD 103	Point éclair ASTM D56	Densité g/ml @ 25°C	pH	Viscosité cinématique@23°C	
Transparent, liquide	Bleu	Frais	-10°C	90°C	36°C	0.971	9.0	12 mm²/s	
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ									
Stable dans les conditions habituelles Incompatibilité : Oxydants forts, chlorures d'acide, sels d'argent Décomposition : Produits : CO ₂ , CO									
11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES									
Toxicité cutanée aiguë		LD50 > 5 000 mg/kg Ne s'est pas révélé être un sensibilisant cutané.			Toxicité orale aiguë		DL ₅₀ >5000 mg/kg		
Irritation oculaire		0,0 gravité après 7 jours.			Toxicité aiguë par inhalation		CL ₅₀ : 2,3 mg/L Rat		
Risques pour la reproduction		L'ingestion/inhalation peut être nocive. (TDL ₀ 300 mg/kg d'éthanol)			Cancérogénicité		Éthanol Groupe 1 par l'IARC en cas d'ingestion		
Tests effectués par Product Safety Labs, Dayton, NJ, États-Unis									
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES									
Les surfactants sont biodégradables dans le sol et l'eau. Persistance improbable selon les données disponibles.									
Éthanol		CE50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)		Méné à tête grosse (Pimephales promelas) : CL50 = 14 200 mg/L/ 96h		Photobacterium phosphoreum : CE50 = 34 634 mg/L/30 min		CE50 = 9268 mg/L/48h CE50 = 10800 mg/L/24h	
						Photobacterium phosphoreum : CE50 = 35 470 mg/L/5 min			
13. CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉLIMINATION									
Se conformer aux réglementations provinciales et/ou fédérales									
14. INFORMATIONS SUR LES TRANSPORTS									
Non applicable.									
N/A		Terre			Mer			Air (IATA)	
		N/A			N/A			N/A	
		N/A			N/A			N/A	
		N/A			N/A			N/A	
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES									
TSCA – Aucune déclaration requise.					CERCLA – Aucun polluant dangereux ni impact sur la couche d'ozone.				
16. AUTRES INFORMATIONS									
Les informations et recommandations contenues dans ce document sont fondées sur des informations considérées comme exactes. Elles sont fournies de bonne foi, sans garantie. Micrylium Laboratories Inc. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite.									
Date d'entrée en vigueur: 2026/04/18					Document : TEXTWIPES 2.0				